



RAMPE

Conforme à la norme NF S 90-116 : 1988

CE 0197

Fabricant : **TECHNOLOGIE MEDICALE** - 101, rue Vaillant Couturier - BP 46
93136 Noisy-le-Sec cedex - France
Tel. : +33 (0)1 48 45 58 95 - Fax : +33 (0)1 49 42 90 21

Fonction : la rampe permet d'alimenter plusieurs dispositifs à partir d'une seule source de gaz.

Stockage : entre - 10°C / + 40°C dans un lieu sec et propre

Pression d'alimentation maxi : 12 bar

Raccordement :

- Raccorder en premier le flexible d'alimentation sur la prise latérale AFNOR de la rampe puis à la source d'alimentation
- Raccorder les dispositifs de distribution sur les 2 prises normalisées AFNOR en façade
- Débrancher toujours en premier le flexible d'alimentation côté source

Le dispositif est composé de :

- 1 corps
- 1 prise normalisée AFNOR latérale sans clapet
- 2 prises normalisées AFNOR en façade avec clapet, conformes à la norme NF S 90-116 de 1988

Entretien et sécurité :

Un contrôle annuel (minimum) devra être effectué :

- Contrôle de l'aspect
- Contrôle de l'étanchéité
- Contrôle de connexion des prises

Ne pas utiliser à proximité d'un point d'ignition

Ne pas mettre le dispositif en contact avec des produits gras

N° de série : gravé sur le corps

Nettoyage et désinfection :

- Nettoyer l'extérieur de la rampe avec de l'eau savonneuse. Rincer et sécher
- Ne pas utiliser de décontaminant de surface

Garantie :

- Dispositif garanti 1 an, pièces et main d'œuvre, sauf détériorations ou accidents provenant de négligences, d'utilisation défectueuse, de défaut de surveillance ou d'entretien
- Durée de vie contractuelle : 10 ans

Suivant la Directive Européenne 93/42/CEE du 14 Juin 93, tout incident doit être immédiatement signalé à TECHNOLOGIE MEDICALE.

Distribué par :