



DEBFLO



DEBPLUS

OXYGENOTHERAPIE
DEBITMETRES A ORIFICES
PRECALIBRES



TECHNOLOGIE
MEDICALE

DEBFLO - DEBPLUS

Le DEBFLO et le DEBPLUS sont des débitmètres à orifices précalibrés qui servent à régler le débit d'un gaz destiné à être administré au patient par voies respiratoires. Ils se connectent à une source murale de gaz sous pression à l'aide d'un embout direct ou d'un montage au rail.

DEBFLO



DEBFLO

Modèle sans détente intégrée

- Corps **gris**
- Précision des débits : conforme à la norme EN ISO 15002
- Pression d'alimentation : 4,5 bar +/- 0,5
- Poids (sans embout) : 150 g
- Dimensions (sans embout) :
H. 82 mm x l. 66 mm x p. 67 mm

Données techniques communes

- Dispositifs médicaux de classe IIa.
- **15 débits disponibles** pour chaque version.
- **Affichage extra-large** de tous les débits.
- **Bonne préhension** de la molette de réglage.

Versions disponibles

- Gaz disponibles : OXYGENE - AIR MEDICAL.
- Disponibles en version simple et double.
- Connexion sur une prise murale par un embout direct ou par l'intermédiaire d'un montage au rail.

Deux versions disponibles pour couvrir toutes les applications !

- 5 l/min (utilisable pour les applications à faibles débits pédiatrie, néonatalogie...).
- 15 l/min.

DEBFLO/DEBPLUS 5 l/min	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
DEBFLO/DEBPLUS 15 l/min	0,5	1	1,5	2	2,5

Utilisation et entretien

Une fois le dispositif connecté sur la prise murale, tourner la molette en façade dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'affichage du débit souhaité.

Accessoires

Olive (1 pièce)
Tétine de sortie (2 pièces)

Switch ou Flow Switch



- Conçus pour un usage hospitalier
- 15 débits disponibles
- Lisibilité de tous les débits
- Détente intégrée (DEBPLUS)

- **Encliquetage des crans de la molette de réglage** pour éviter un changement de débit accidentel.
- **Débit de gaz entre deux positions** pour une plus grande sécurité.
- Numéro de série unitaire gravé sur chaque produit.

- Norme : AFNOR (norme française).
- Disponibles pour le marché export aux normes : DIN, BS, US OHMEDA DIAMOND, DISS, UNI, NORDIC.
- Autres normes : nous consulter.

0,6	0,7	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5
3	3,5	4	5	6	7	8	9	12	15

Utiliser un nettoyant désinfectant pour dispositifs médicaux. Laisser sécher avant toute nouvelle utilisation. En cas d'utilisation de produit décontaminant, vérifier leur compatibilité avec le plastique. Ne pas immerger.

Humidificateur CCO



Humidificateur TMS



DEBPLUS



DEBPLUS

Modèle avec détente intégrée

- Corps **blanc**
- Précision des débits : conforme à la norme EN ISO 10524-4
- Pression d'alimentation : de 2,8 à 8 bar
- Pression de sortie : 1,7 bar +/- 0,1
- Poids (sans embout) : 150 g
- Dimensions (sans embout) : H. 82 mm x l. 66 mm x p. 67 mm

En présence de réseaux instables, la détente intégrée permet de stabiliser la pression d'alimentation pour délivrer au patient un débit de gaz précis.

DEBFLO



DB01-F

DEBFLO O₂ 5 l/min avec tétine de sortie et embout direct AFNOR TM CHOC



DB02-F

DEBFLO AIR MEDICAL 15 l/min avec tétine de sortie et embout direct AFNOR TM CHOC



DB03-F

DEBFLO O₂ 15 l/min avec humidificateur CCO 250 ml et embout direct AFNOR TM CHOC

DEBPLUS




DP01-F

DEBPLUS O₂ 15 l/min avec tétine de sortie et embout direct AFNOR TM CHOC



DP02-F

DEBPLUS AIR MEDICAL 5 l/min avec tétine de sortie et montage au rail AFNOR (griffe universelle TM en polycarbonate)

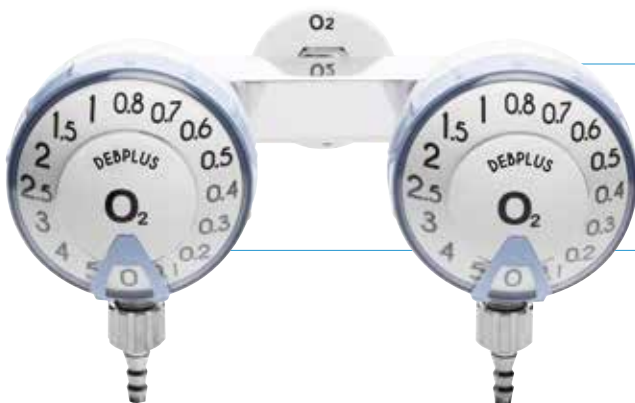

DP03-F

DEBPLUS DOUBLE O₂ 5 l/min - 5 l/min avec tétines de sortie et embout direct AFNOR TM CHOC



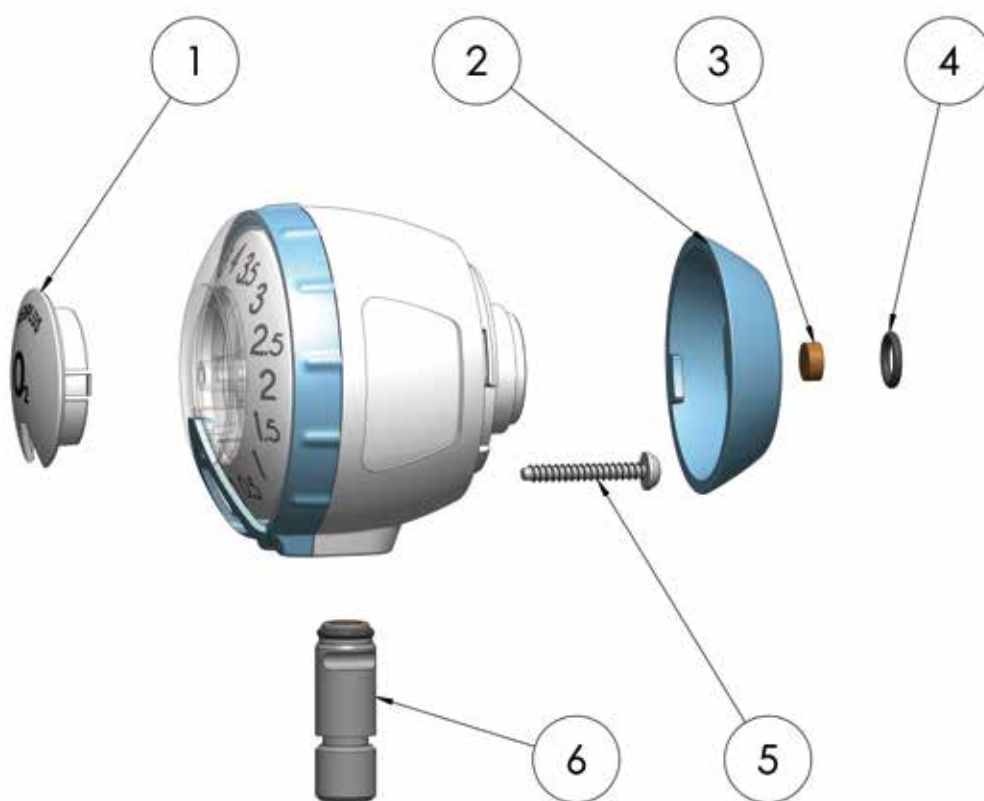
Tableau de références		DEBFLO DEBITMETRE A ORIFICES PRECALIBRES				DEBPLUS DEBITMETRE A ORIFICES PRECALIBRES AVEC DETENTE INTEGRÉE			
Gaz		OXYGENE (O ₂)		AIR MEDICAL		OXYGENE (O ₂)		AIR MEDICAL	
Débits		5 l/min	15 l/min	5 l/min	15 l/min	5 l/min	15 l/min	5 l/min	15 l/min
Avec embout direct AFNOR TM CHOC 	Sortie 12x125 M	20614	20620	20590	20596	21026	21032	21002	21008
	Sortie 9/16 M	20626	20632	20602	20608	21038	21044	21014	21020
	Tétine 12x125 (2 pièces)	20616	20622	20592	20598	21028	21034	21004	21010
	Olive 12x125 (1 pièce)	20615	20621	20591	20597	21027	21033	21003	21009

Tableau de références		DEBFLO DEBITMETRE A ORIFICES PRECALIBRES				DEBPLUS DEBITMETRE A ORIFICES PRECALIBRES AVEC DETENTE INTEGRÉE			
Gaz		OXYGENE (O ₂)		AIR MEDICAL		OXYGENE (O ₂)		AIR MEDICAL	
Débits		5 l/min	15 l/min	5 l/min	15 l/min	5 l/min	15 l/min	5 l/min	15 l/min
Avec montage rail AFNOR TM CHOC (griffe en polycarbonate) 	Sortie 12x125 M	20617	20623	20593	20599	21029	21035	21005	21011
	Sortie 9/16 M	20629	20635	20605	20611	21041	21047	21017	21023
	Tétine 12x125 (2 pièces)	20619	20625	20595	20601	21031	21037	21007	21013
	Olive 12x125 (1 pièce)	20618	20624	20594	20600	21030	21036	21006	21012



Référence		Désignation	
1	O ₂	21432	Pastille DEBFLO O ₂ blanche
	AIR	21434	Pastille DEBFLO AIR noire
	O ₂	21436	Pastille DEBPLUS O ₂ blanche
	AIR	21438	Pastille DEBPLUS AIR noire
2	O ₂	21417	Coque arrière O ₂ bleue DEBFLO/DEBPLUS
	AIR	21418	Coque arrière AIR noire DEBFLO/DEBPLUS
3	11029	Filtre entrée DEBFLO/DEBPLUS	
4	11684	Joint d'entrée DEBFLO/DEBPLUS	
5	21445	Vis DEBFLO/DEBPLUS	
6	21457	Sortie DEBFLO/DEBPLUS 12x125 M complète	
	21458	Sortie DEBFLO/DEBPLUS 9/16 M complète	



Aussi disponible



Distribué par

**OXYGENOTHERAPIE
DEBITMETRES A ORIFICES
PRECALIBRES**



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**

101 rue Vaillant Couturier - 93130 NOISY LE SEC France
Tél. : +33 (0)1 48 45 58 95 - Fax : +33 (0)1 49 42 90 21 - +33 (0)1 48 45 29 00 - info@technologiemedicale.com
www.technologiemedicale.com